

LG2004/LG2004S

**Oruga salva
escaleras**



LG2004/LG2004S

- Ayuda para superar escaleras con el usuario sentado en la propia silla de ruedas
- Mínimo esfuerzo para el acompañante
- Muy seguro y confortable
- Desmontable y portátil
- Compatible con la mayoría de sillas (también con ruedas de 300mm)
- Muy sencillo de utilizar



LG2004/LG2004S

Mandos de la oruga

Indicador de pendiente

No continuar subiendo o bajando las escaleras si la burbuja se encuentra en la zona roja



Botón de descenso de las ruedecilas traseras

Botón de marcha atrás

Botón de parada de emergencia


Botón de marcha adelante

LG2004/LG2004S

La base de la oruga

Llave de encendido/apagado

Indicador de carga de batería

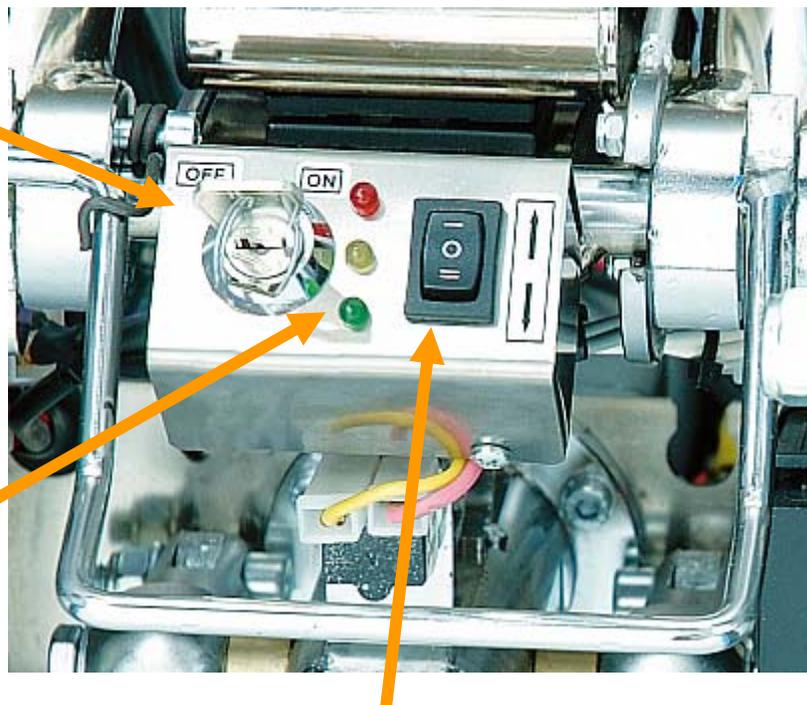

Botón de marcha adelante/atrás para mover la base.


Este botón debe usarse sólo para mover la base de la oruga cuando esté separada del manillar

LG2004/LG2004S

La base de la oruga


Palanca de
bloqueo del
manillar en la base

Palanca de
enganche/liberación
del manillar a la base

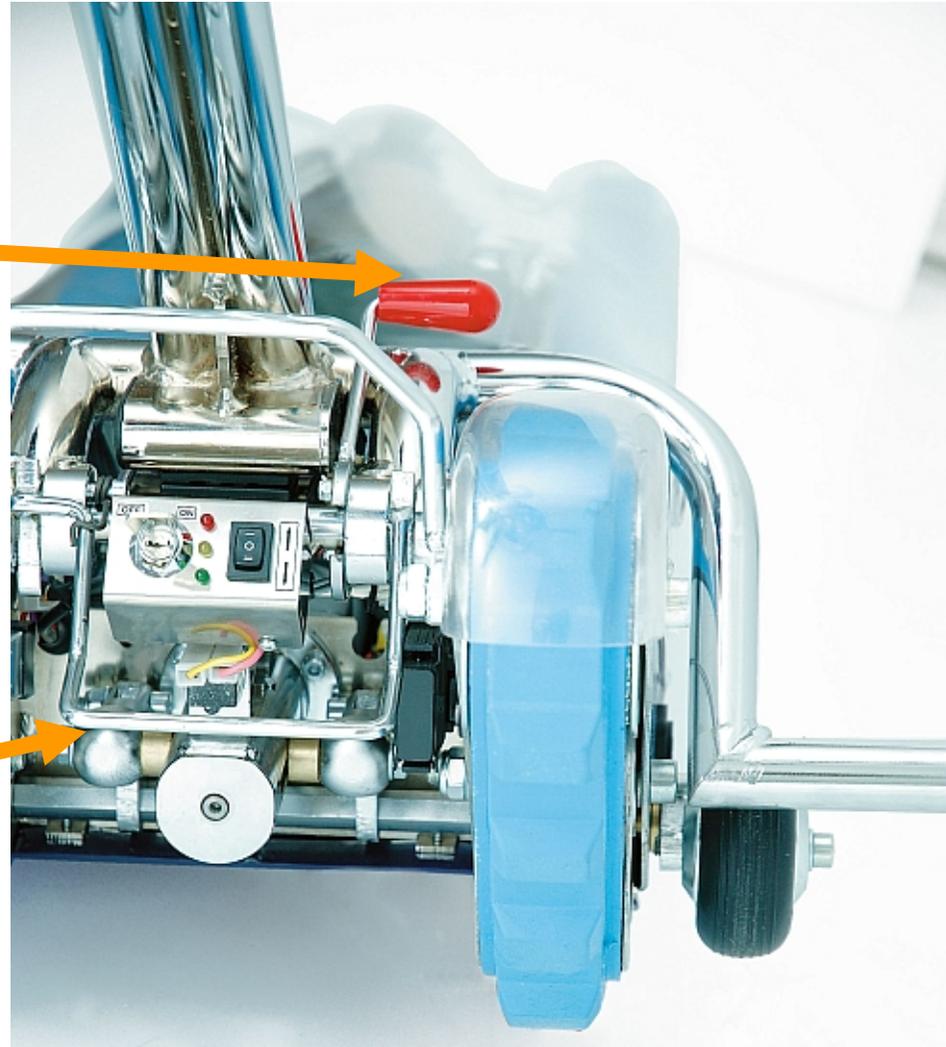

LG2004/LG2004S

Anclaje de la silla a la oruga

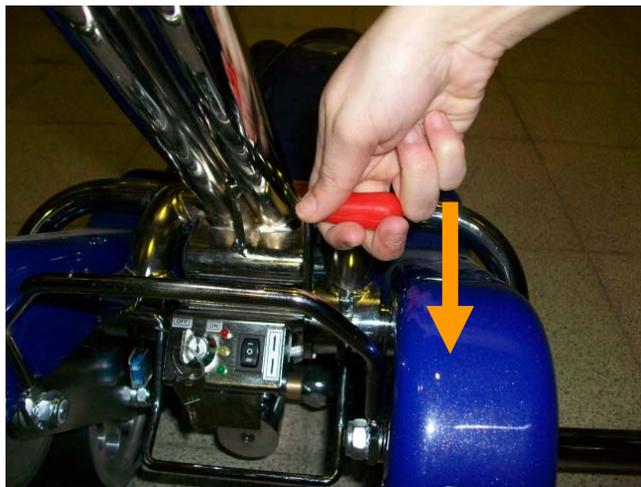

1.- Con la oruga apagada (llave en OFF) liberar la palanca roja de bloqueo del manillar tirando de ella hacia atrás



2.- Levantar con el pié hacia arriba la palanca de enganche del manillar a la base.

El manillar quedará suelto.



3.- Empujar hacia delante el manillar hasta apoyar el respaldo de la silla en él

LG2004/LG2004S

Anclaje de la silla a la oruga

Los enganches son ajustables en altura y en anchura, para adaptarse a cualquier tipo de silla



Ajuste en anchura de los enganches

Ajuste en altura de los enganches

LG2004/LG2004S

Anclaje de la silla a la oruga



4.- Gire hacia la derecha para aflojar los pomos de ajuste en anchura de los enganches

5.- Tire hacia fuera de los pomos redondos azules y gírelos 90° hasta que queden enganchados en las muescas y bloqueados



6.- Deslice los enganches hasta que entren en contacto con el respaldo de la silla

LG2004/LG2004S

Anclaje de la silla a la oruga



7.- Los tubos verticales de los enganches tienen que quedar **por el interior de las empuñaduras**



8.- Girar de nuevo 90° los pomos azules redondos para liberarlos



6.- Estos enganches tienen que quedar siempre **por delante del tubo del respaldo**

LG2004/LG2004S

Anclaje de la silla a la oruga



8.- Apretar de nuevo los pomos de ajuste en anchura girándolos hacia la izquierda para fijar la posición de los enganches




9.- Con el usuario ya sentado en la silla, bloquee de nuevo el manillar en la base tirando de él hacia abajo. Un click confirmará que el manillar se ha bloqueado correctamente



10. – Tire hacia arriba la palanca roja para asegurar y bloquear de nuevo la posición del manillar

LG2004/LG2004S

Anclaje de la silla a la oruga

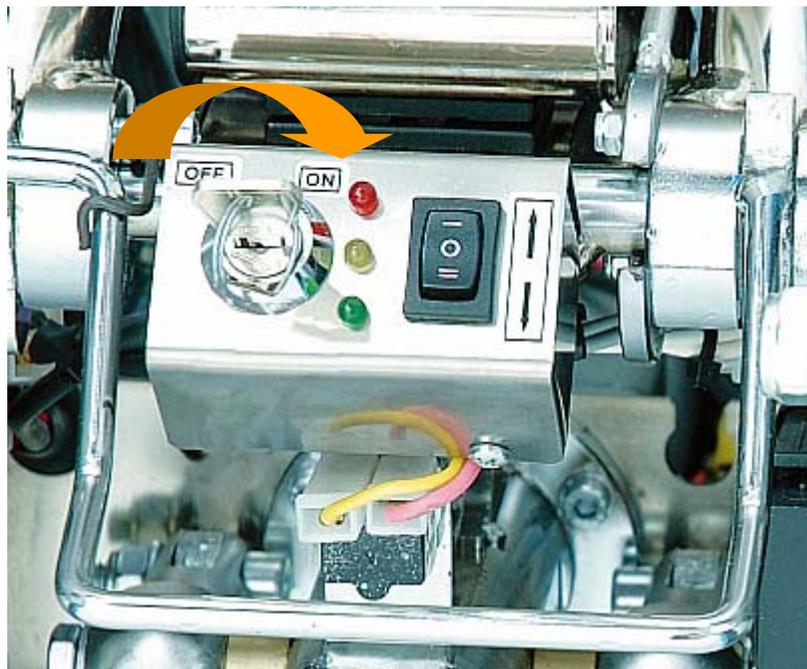

11.- Gire la llave en la base a la posición ON. Compruebe que el botón rojo de parada de emergencia está desactivado. En caso contrario gírelo hacia la derecha para liberarlo. La oruga no andará si el botón de parada de emergencia está activado.



12.- Para soltar la silla de la oruga, invierta el proceso

LG2004/LG2004S

Manejo de la oruga

El botón de descenso de las ruedecillas hace que estas desciendan hasta entrar en contacto con el suelo, elevándose la parte trasera de la oruga.

Esto es muy útil para ayudar a girar la oruga en superficies planas. Haciendo palanca en el manillar, el morro de la oruga se levanta del suelo, y la oruga queda apoyada únicamente sobre estas ruedas traseras, que permiten girarla y manejarla más cómodamente



LG2004/LG2004S



El reposacabezas va sujeto mediante velcros. Permite ajuste en altura a lo largo de la banda de velcro.

Con cinturón de seguridad de serie y reposacabezas acolchado, y ajustable en altura.

Gran confort y seguridad

LG2004/LG2004S




Desmontable en partes



Fácil transporte y almacenaje

LG2004/LG2004S

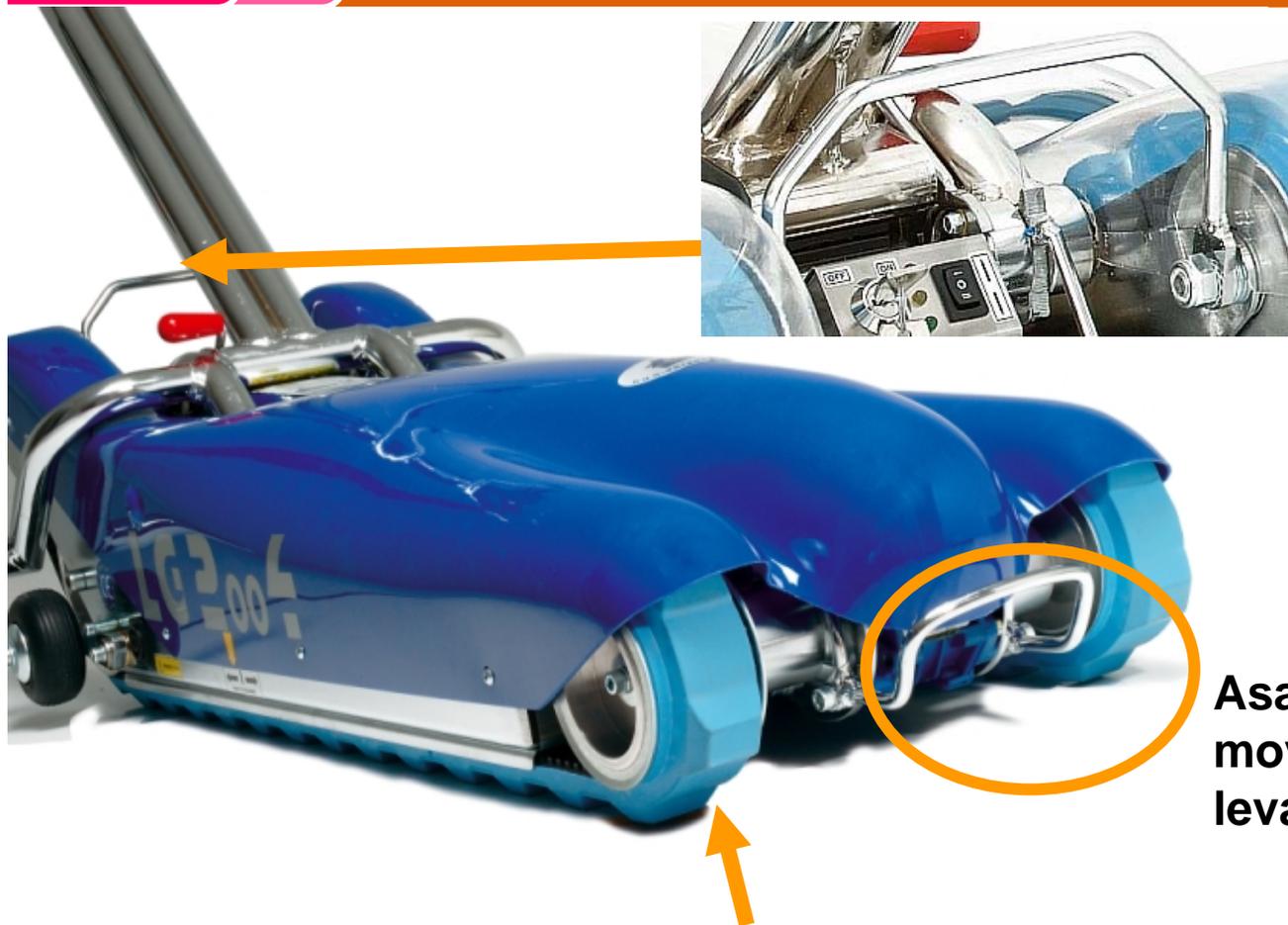

Asa trasera para ayudar a mover manualmente o levantar la base de la oruga

Asa delantera para ayudar a mover manualmente o levantar la base de la oruga

Base de goma que no deja marcas en el suelo ni en las escaleras al subir y bajar con la oruga

LG2004/LG2004S

Opciones



Ref. LG2004.1




Apoyos para sillas con ruedas traseras de 300 mm (opcional)

LG2004/LG2004S

Opciones

Modelo LG2004S

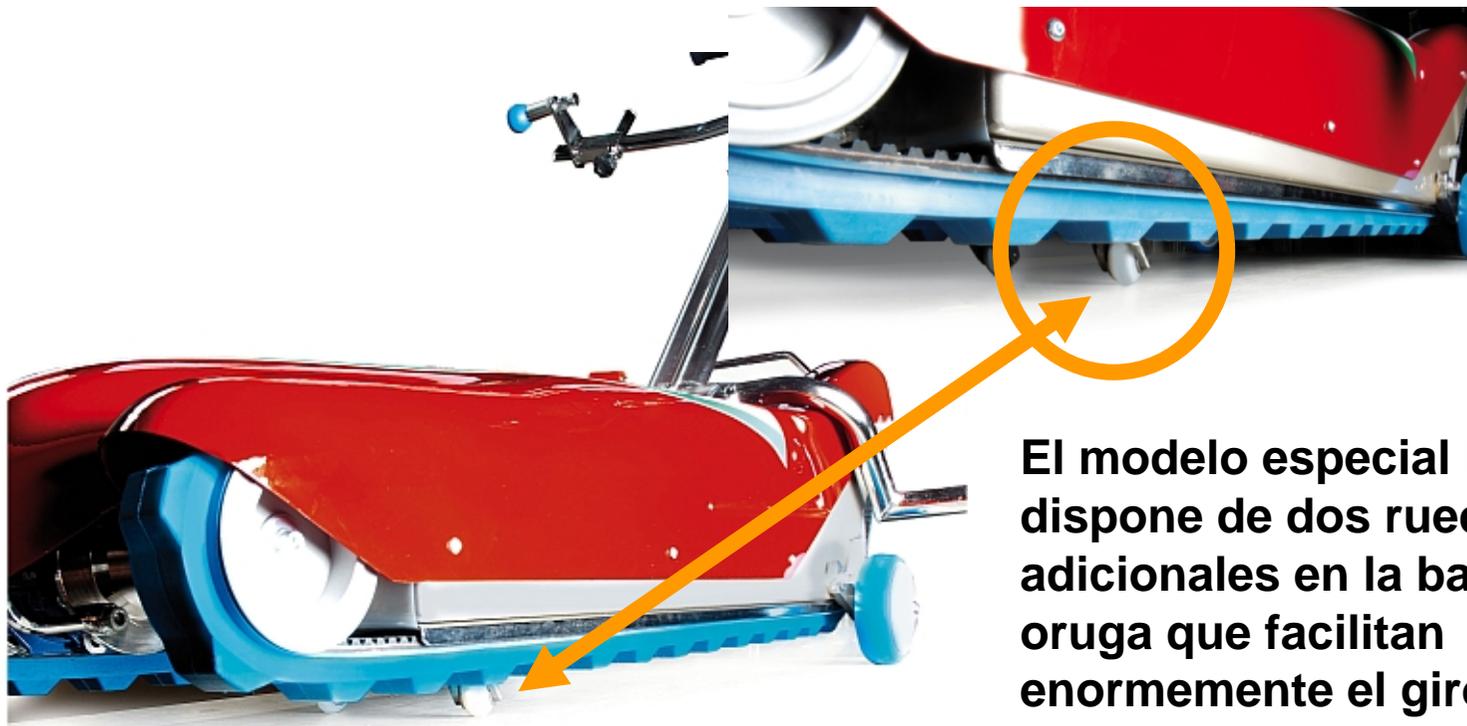

El modelo especial LG2004S dispone de dos ruedecillas adicionales en la base de la oruga que facilitan enormemente el giro y la maniobrabilidad de la oruga en superficies planas

LG2004 / LG2004S

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas LG2004 / LG2004S

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Anchura de la base: | 32 cm | Autonomía con batería en reserva: 2 plantas (15 escalones por planta) | |
| Longitud de la base: | 95 cm | Velocidad máxima: | 15 escalones / minuto |
| Altura del manillar: | 95 cm | Pendiente máxima: | 35° (70%) |
| Batería recargable: | 12 V, 24 Ah sin mantenimiento | Altura máxima de escalón: | 18 cm |
| Peso de la base: | 45,62 kg | Anchura mínima de la escalera: | 100 cm |
| Peso del manillar: | 8,92 kg | Medidas mínimas escalera en forma de "L": | 100 x 100 cm |
| Peso del cargador: | 0,7 kg | Medidas mínimas escalera en forma de "U": | 100 x 200 cm |
| Peso máximo de carga transportada: | 130 kg | Colores: | Rojo brillante y azul brillante |
| Autonomía máxima: | 23 plantas (15 escalones por planta) | | Modelo especial LG2004S disponible sólo en rojo brillante |

LG2004/LG2004S

Referencias



LG2004/A

Para el color azul brillante



LG2004/R

Para el color rojo brillante

LG2004S

Modelo especial. Sólo en color rojo brillante

